

### Entretien et nettoyage

Le système a été conçu pour réduire au plus le nettoyage et les entretiens.

Toujours déconnecter le système électrique et le compresseur avant toute opération

#### Compresseur

Verser le détergent sur un chiffon doux

Ne pas mettre de liquide directement sur le compresseur

Vérifier régulièrement si les connexions du compresseur ne s'obstruent pas

Dans ce cas, utilisez un bâtonnet doux, étroit pour dégager les sorties d'air

#### Sur-matelas

Le premier nettoyage peut être fait en utilisant un linge humide et un désinfectant d'utilisation courante.

Attention de ne pas utiliser d'abrasif, et/ou une surface contondante qui pourrait perforer la surface du sur-matelas ou un de ses éléments.

Pour une désinfection plus complète du sur-matelas, voyez avec un centre spécialisé qui vous conseillera le produit spécifique et les instructions s'y reportant.

### Résolution des problèmes

Si le compresseur ne s'allume pas vérifiez si la prise est bien branchée et si les fusibles ne sont pas déclenchés (au dos du compresseur)

Si la pression du sur-matelas est faible, vérifiez que les tuyaux ne soient pas pliés ou écrasés et que le sur-matelas ne soit pas perforé.

## Mode d'emploi - PM100

Convient lors de traitements de longue durée et pour les soins à domicile. Une utilisation régulière du matelas évite la formation d'escarres.

Poids maximum : 120 kg

Supporte une température de -15/50°C et une humidité de 10% à 90%



Le kit contient :


- 1) Un compresseur avec régulation
- 2) Un sur-matelas à bulles (alvéolées) avec rabats
- 3) Un kit de réparation
- 4) 2 tuyaux pour relier le matelas au compresseur

## Installation

Contrôlez si la confection de votre kit est conforme et ne présente pas de dégâts. Dans ce cas, contactez nous immédiatement


Pour une installation correcte, suivez les étapes mentionnées ci-après :

1. Installez le sur-matelas sur le matelas du lit. Le côté du sur-matelas où les tuyaux se branchent doit être placé au pied du lit.
2. Replier les rabats du sur-matelas sous le matelas normal pour qu'ils soient bien en place ( stabilité du matelas)
3. Suspendez le compresseur sur le pied du lit avec les 2 crochets ou sur une surface plane.

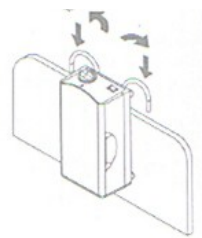

Ne pas le placer près d'une source de chaleur

4. Connectez fermement les tuyaux au matelas et au compresseur (sur le côté droit)
5. Assurez-vous que les tuyaux soient bien enfoncés et qu'ils ne soient pas écrasés ou tordus.
6. Branchez le cordon électrique au compresseur. Attention, contrôlez si la tension reprise sur l'appareil correspond à celle de votre circuit électrique
7. Appuyez sur le bouton « ON » situé sur le côté (une lumière verte indique le fonctionnement correct).
8. Réglez la pression au maximum pendant environ 20 minutes puis ajustez la pression en fonction du poids du patient (voir Ch. utilisation).

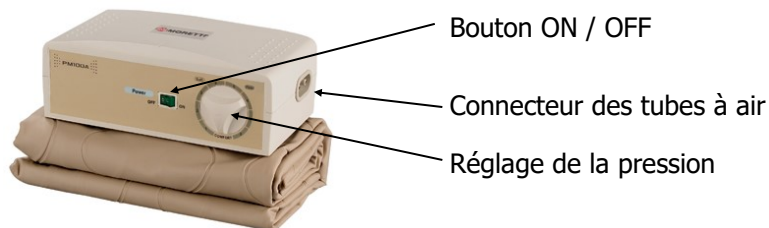

## Utilisation

- Vérifier que le matelas soit correctement gonflé avant d'installer le patient dessus (Durée du gonflage : 20 minutes)
- Toujours couvrir avec un drap propre en coton quand vous utilisez le sur-matelas à air.
- La pression est ajustable, utilisez ce tableau pour déterminer le réglage en fonction du poids du patient :

Jusque 40 kg : position 2-3  
 De 40 à 60 kg : position 3-4  
 De 60 à 70 kg : position 4-5  
 De 70 à 80 kg : position 5-6  
 De 80 à 90 kg : position 6-7  
 Plus de 90 kg : position 8

Laissez le compresseur allumée durant tout le temps où le patient est sur le lit



Le sur-matelas anti escarres doit toujours être installé sur un matelas normal



Au cas où vous devriez dégonfler rapidement le sur-matelas, retirez les tuyaux du matelas.

## Contre indications

Le sur-matelas ne doit pas être utilisé en cas de lésion de la colonne dorsale ou en cas où le patient est placé sous traction cervicale

Consultez toujours le médecin de référence avant la mise en service de la thérapie.

Ne jamais utiliser le sur-matelas comme mode de transport du patient