


LÈVE PERSONNE

MODE D'EMPLOI



BOITIER D'ALIMENTATION

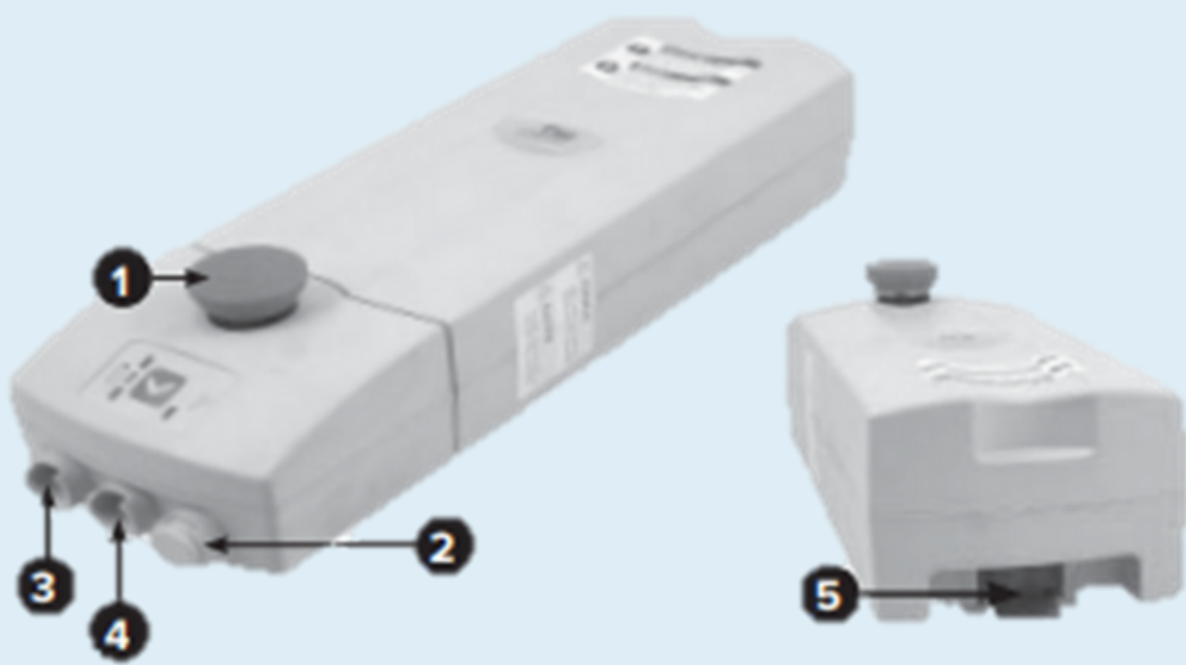

- 1- BOUTON D'ARRET D'URGENCE
- 2- BOUTON DE DESCENTE ÉLECTRIQUE D'URGENCE
- 3- CONNEXION VERIN
- 4- CONNEXION TÉLÉCOMMANDE
- 5- BOUTON DEVEROUILLAGE DE BATTERIE

AVANT CHAQUE UTILISATION

VÉRIFIER LE NIVEAU DE CHARGE DU BOITIER

- VERT : BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE
- VERT ET JAUNE : BATTERIE CHARGÉE AU 3/4
- JAUNE : BATTERIE CHARGÉE À 1/2
- JAUNE ET ROUGE : BATTERIE PRESQUE VIDE
- ROUGE : BATTERIE VIDE

BIP À RÉPÉTITION LORS DE L'UTILISATION : ATTENTION BATTERIE FAIBLE

VÉRIFIER LA MISE EN PLACE DU LÈVE PERSONNE

**POID MAX DE LA PERSONNE : 175KG
SI LE SOL EST STABLE
L'ÉTAT DE LA SANGLE
LES FREINS**