

MATELAS AIR RM 12

MODE D'EMPLOI



FONCTIONS DU COMPRESSEUR

1- OPTIMAL PRESSURE SETTING (OPS) : MODE NORMAL DE PRÉVENTION ET D'AIDE AU TRAITEMENT D'ESCARRE, ALTERNANCE DE PRESSION DES CELLULES D'AIR.


2- SLOW SOFT MODE (SSM) : POUR LES SOINS PALIATIFS.

3- STATIC MODE : MODE STATIQUE, TOUTES LES CELLULES SONT GONFLÉES UNIFORMÉMENT.

4- NURSING MODE : SURGONFLAGE DES CELLULES POUR FACILITER LES SOINS.

5- ALARME POUR INDIQUER UNE PRESSION D'AIR TROP FAIBLE ET/OU POUR INDIQUER UNE PANNE DE COURANT ÉLECTRIQUE.

6- VÉROUILLAGE / DÉVÉROUILLAGE DU COMPRESSEUR.

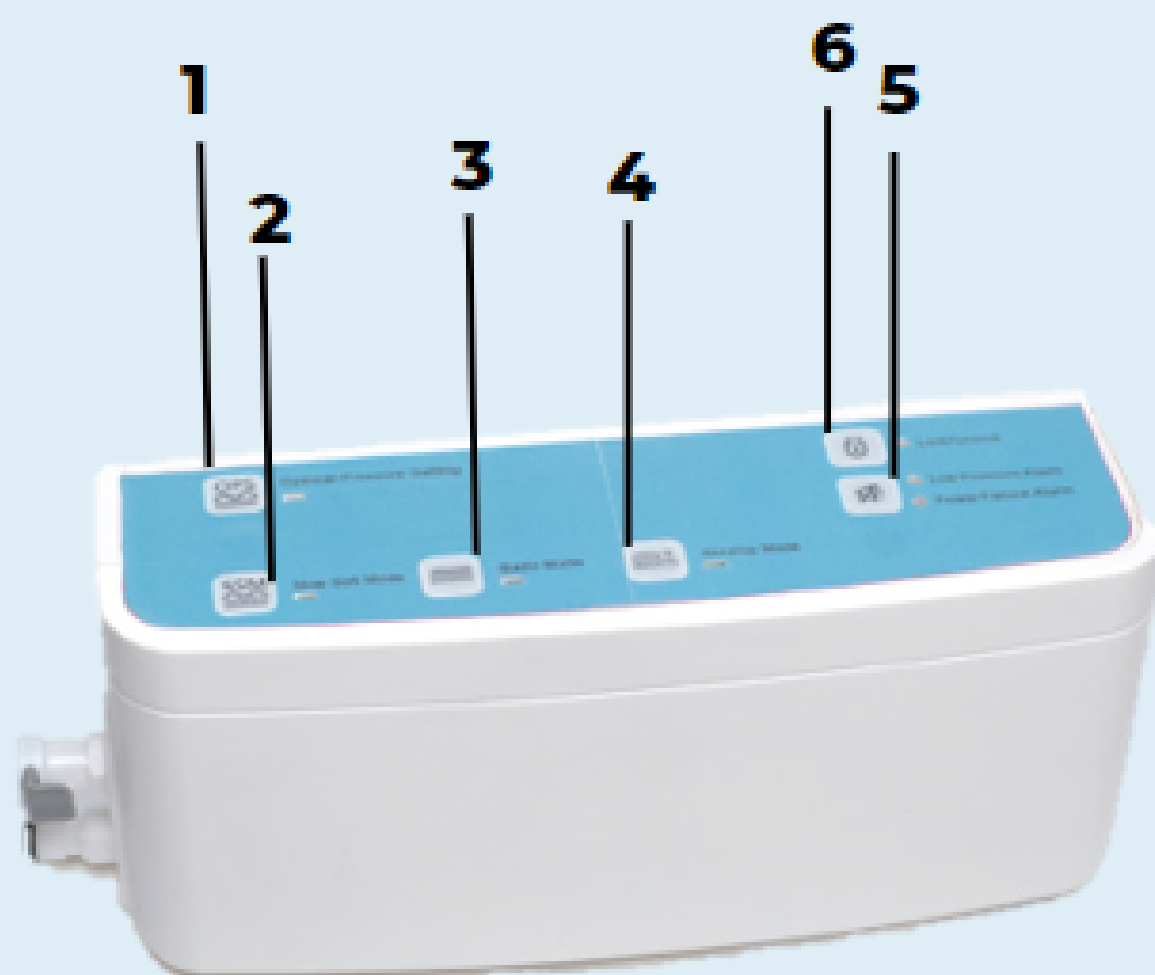

MATELAS AIR RM 12

MODE D'EMPLOI



CARACTÉRISTIQUES

POIDS MAXIMUM DE LA PERSONNE : 160KG

RISQUE D'ESCARRE : STADE 1 À 4

DIMENSION STANDARD : 195CM/85CM/17CM

VANNE CPR : DÉGONFLAGE RAPIDE D'URGENCE

ALARME

SI L'ALARME SE DÉCLANCHE :

- VÉRIFIER LE BRANCHEMENT DE LA PRISE ÉLECTRIQUE ET DES TUYAUX

- VÉRIFIER QUE LA VANNE CPR EST FERMÉE

SI L'ALARME CONTINUE APRÈS LES VÉRIFICATIONS CI-DESSUS, DÉBRANCHER ET REBRANCHER LE COMPRESSEUR.